


Infračervený měřič teploty lidského těla XL-WMT-K3P

Infračervený merač teploty ľudského tela XL-WMT-K3P

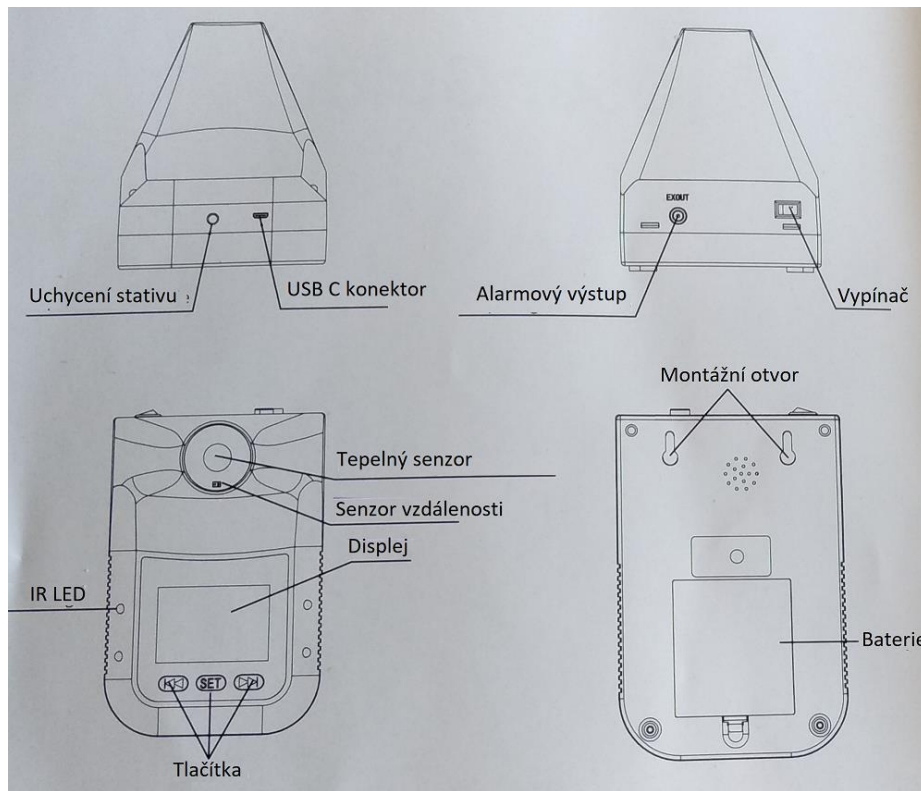


Specifikace

1. Přesnost měření je $\pm 0,2$ v rozsahu $35^{\circ}\text{C} - 42^{\circ}\text{C}$ (Umístěte zařízení na požadované místo 30 minut před spuštěním měření)
2. Alarmové funkce: automatický alarm při abnormální teplotě. Blikání + zvukové hlášení po dobu 10 vteřin.
3. Vzdálenost měření 5cm - 10cm. Automatické měření.
4. LCD displej
5. USB typ C
6. Napájení: 4x AA baterie, Zdroj 5V 500mA
7. Instalace: Povrchová na omítku
8. Teplota prostředí: $10^{\circ}\text{C} - 40^{\circ}\text{C}$. (Doporučené $15^{\circ}\text{C} - 35^{\circ}\text{C}$)
9. Rozsah měření: $0 - 50^{\circ}\text{C}$
10. Čas měření: 0,5s
11. Standby: automatický standby po 30 vteřinách
12. Vstup: DC 5V 500mA
13. Váha: 303g
14. Rozměry: 170x115x140mm
15. Kapacita počítání: 9999

Špecifikácie

1. Presnosť merania je $\pm 0,2$ v rozsahu $35^{\circ}\text{C} - 42^{\circ}\text{C}$ (Umiestnite zariadenie na požadované miesto 30 minút pred spustením merania)
2. Alarmové funkcie: automatický alarm pri nezvyčajnej teplote. Blikanie + zvukové hlásenia po dobu 10 sekúnd.
3. Vzdialenosť merania 5cm - 10cm. Automatické merania.
4. LCD displej
5. USB typ C
6. Napájanie: 4x AA batérie, Zdroj 5V 500mA
7. Inštalácia: Povrchová na omietku
8. Teplota prostredia: $10^{\circ}\text{C} - 40^{\circ}\text{C}$. (Odporúčané $15^{\circ}\text{C} - 35^{\circ}\text{C}$)
9. Rozsah merania: $0 - 50^{\circ}\text{C}$
10. Čas merania: 0,5s
11. Standby: automatický standby po 30 sekundách
12. Vstup: DC 5V 500mA
13. Váha: 303g
14. Rozmery: 170x115x140mm
15. Kapacita počítania: 9999


Displej

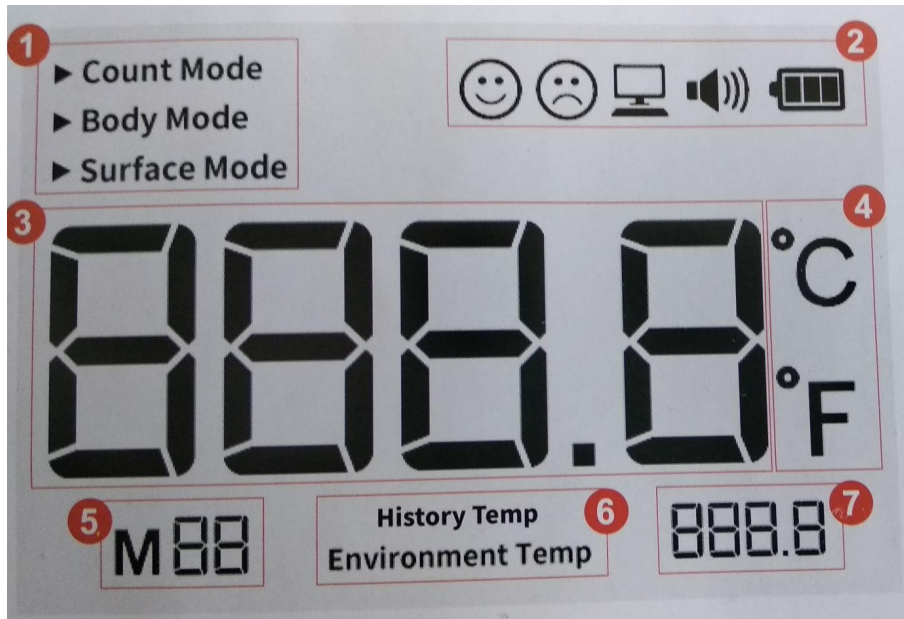

1. Pracovní mód: Počítání osob (Count mode), Lidská teplota (Body mode), Teplota povrchu (Surface mode)
2. Status: Normální/abnormální teplota (smajlíci), připojení přes USB, hlasitost, stav baterie.
3. Výsledek měření
4. Jednotka měření: Celsius, Farenheit
5. Označení historie měření
6. Historie měření nebo okolní teplota
7. Zobrazení okolní teploty


1. Pracovní mód: Počítanie osôb (Count mode), Ľudská teplota (Body mode), Teplota povrchu (Surface mode)
2. Status: Normálny / abnormálne teplota (smajlíci), pripojenie cez USB, hlasitosť, stav batérie.
3. Výsledok merania
4. Jednotka merania: Celsius, Farenheit
5. Označenie histórie merania
6. História meranie alebo okolitá teplota
7. Zobrazenie okolitej teploty

Indikace: Normální teplota: LED diody blikají zeleně

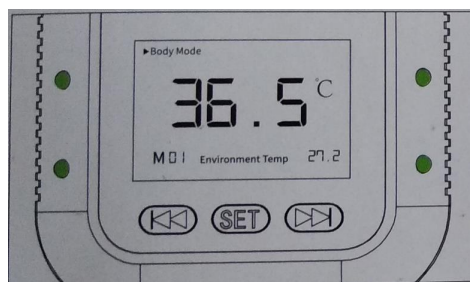


Indikácia: Normálna teplota: LED diódy blikajú zelene

Abnormální teplota: LED diody blikají červeně

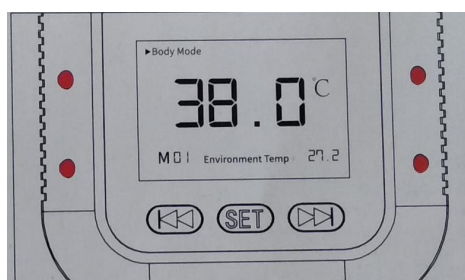


Abnormálna teplota: LED diódy blikajú na červeno

Velmi nízká teplota.
Méně, než 35°C

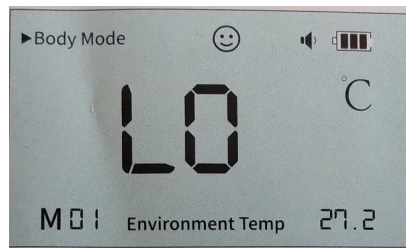

Velmi nízka teplota. Menej,
ako 35 ° C

Velmi vysoká teplota.
Více, než 42°C

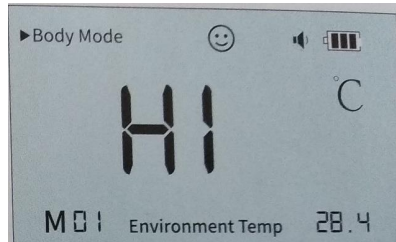

Velmi vysoká teplota.
Viac, ako 42 ° C

5. Ovládání


5.1 Nastavení jednotek

Stiskněte tlačítko "Press". Dostanete se do nastavení F1. Stisknutím pravé nebo levé šipky můžete změnit jednotku teploty. Celsius nebo Fahrenheit.

5. Ovládanie

5.1 Nastavenie jednotiek

Stlačte tlačidlo "Press". Dostanete sa do nastavení F1. Stlačením pravej alebo ľavej šípky môžete zmeniť jednotku teploty. Celsius alebo Fahrenheit.

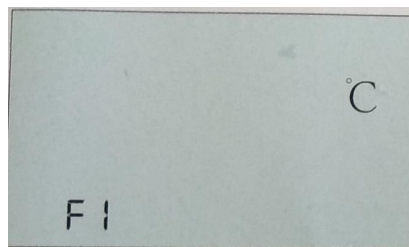


5.2 Nastavení funkce terminálu

Stiskněte znovu tlačítko "Press". Dostanete se do nastavení F2. Zde můžete vybrat pracovní mód. Stisknutím pravé nebo levé šipky můžete vybrat počítání průchodu, měření lidské teploty nebo měření povrchu. Není možné zapnout více módu zároveň.


5.2 Nastavenie funkcie terminálu

Znovu stlačte tlačidlo "Press". Dostanete sa do nastavení F2. Tu môžete vybrať pracovný mód. Stlačením pravej alebo ľavej šípky môžete vybrať počítanie priechodu, meranie ľudskej teploty alebo meranie povrchu. Nie je možné zapnúť viac módu zároveň.

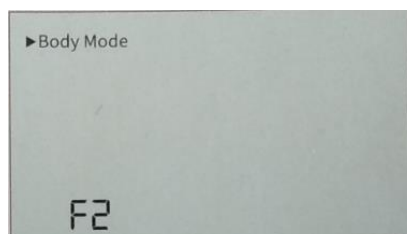

5.3 Nastavení alarmu při překročení teploty

Stiskněte znovu tlačítko "Press". Dostanete se do nastavení F3. Zde je možné nastavit maximální hodnotu, kdy je lidská teplota v pořádku. Při překročení bude spuštěn alarm. Hodnotu lze nastavit v rozmezí 37-38°C. Tovární hodnota je 37,3°C.

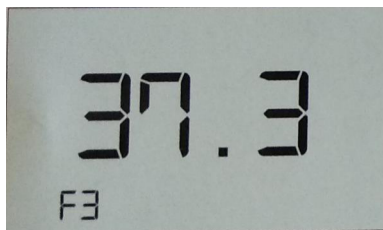


5.3 Nastavenie alarmu pri prekročení teploty

Znovu stlačte tlačidlo "Press". Dostanete sa do nastavení F3. Tu je možné nastaviť maximálnu hodnotu, kedy je ľudská teplota v poriadku. Pri prekročení bude spustený alarm. Hodnotu je možné nastaviť v rozmedzí 37-38°C. Továrnske hodnota 37,3 ° C.

5.4 Nastavení hlasitosti

Stiskněte znovu tlačítko "Press". Dostanete se do nastavení F4. Stisknutím pravé nebo levé šipky můžete měnit hlasitost terminálu.

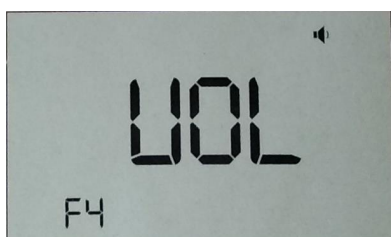

5.4 Nastavenie hlasitosti


Znovu stlačte tlačidlo "Press". Dostanete sa do nastavení F4. Stlačením pravej alebo ľavej šípky môžete meniť hlasitosť terminálu.

5.5 Nastavení podsvícení

Stiskněte znovu tlačítko "Press". Dostanete se do nastavení F5. Zde je možná vypnout nebo zapnout podsvícení displeje. Stisknutím pravé nebo levé šipky můžete vypnout nebo zapnout podsvícení.

ON = zapnuté podsvícení

OFF= vypnuté podsvícení

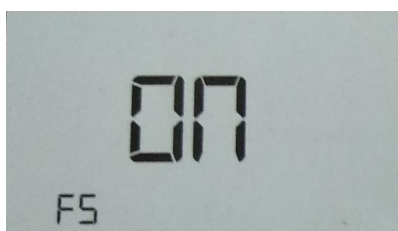

5.5 Nastavenie podsvietenia

Znovu stlačte tlačidlo "Press". Dostanete sa do nastavení F5. Tu je možná vypnúť alebo zapnúť podsvietenie displeja. Stlačením pravej alebo ľavej šípky môžete vypnúť alebo zapnúť podsvietenie.


ON = zapnuté podsvietenie

OFF = vypnuté podsvietenie

5.6 Nastavení jazyka

Stiskněte znovu tlačítko "Press". Dostanete se do nastavení F6. Stisknutím pravé nebo levé šipky se změní jazyk. Je možné vybrat angličtinu nebo čínštinu. Změní se text na displeji a hlasový doprovod.

EN = angličtina
CH = čínština

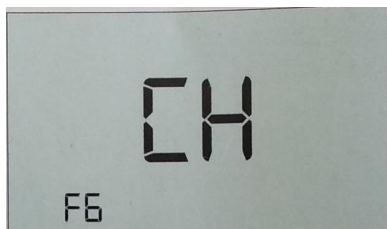

5.6 Nastavenie jazyka

Znovu stlačte tlačidlo "Press". Dostanete sa do nastavení F6. Stlačením pravej alebo ľavej šípky sa zmení jazyk. Je možné vybrať angličtinu alebo čínštinu. Zmení sa text na displeji a hlasový sprievod.

EN = angličtina
CH = čínština

5.7 Nastavení alarmového výstupu

Stiskněte znovu tlačítko "Press". Dostanete se do nastavení F7. Stisknutím pravé nebo levé šipky je možné vybrat jeden ze dvou alarmových módu.

S1 = Přepínací mód
S2 = Pulzní mód



5.7 Nastavenie alarmového výstupu

Znovu stlačte tlačidlo "Press". Dostanete sa do nastavení F7. Stlačením pravej alebo ľavej šípky je možné vybrať jeden z dvoch alarmových módu.

S1 = Prepínací mód
S2 = Pulzná mód

6. Varování

- Po změně umístění musí být zařízení minimálně 30 minut v klidu.
- Pro měření teploty používejte čelo.
- Nenechávejte zařízení na přímém slunci.
- Neumísťujte zařízení v blízkosti klimatizace nebo větráku.
- Používejte kvalitní baterie.

6. Varovanie

- Po zmene umiestnenie musí byť zariadenie minimálne 30 minút v pokoji.
- Pre meranie teploty používajte čelo.
- Nenechávajte zariadenie na priamom slnku.
- Neumiestňujte zariadenie v blízkosti klimatizácie alebo vetráku.
- Používajte kvalitné batérie.