


Pro zapnutí a vypnutí teploměru použijte tlačítko na boku přístroje:

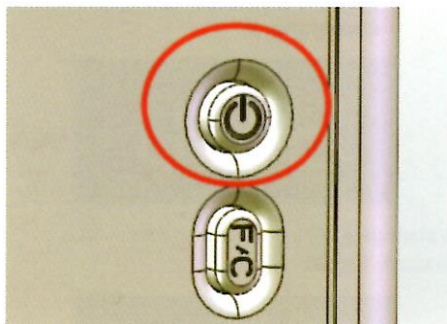

Upozornění

- 1) Nedotýkejte se přímo senzorů pro měření teploty a detekce přítomnosti ruky, zabráníte tak jejich znečištění a nepřesné funkci zařízení.
- 2) Zařízení provozujte výhradně ve stojací svislé poloze!

XtendLan


CE FC RoHS 

Teploměr s inteligentním dávkovačem dezinfekce



XL-WMT-K9

Popis částí

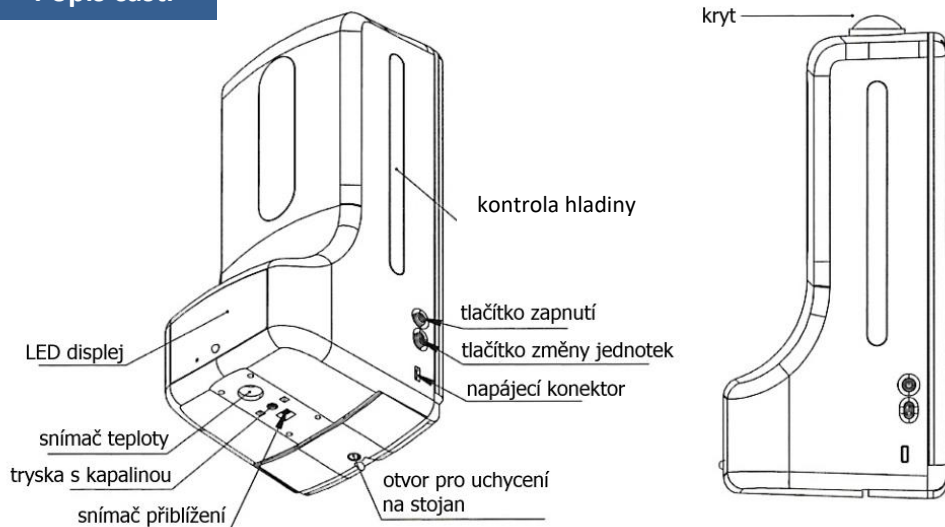

Vlastnosti

- Přesnost měření teploty $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ (v rozsahu $34\sim 45^{\circ}\text{C}$)
- Upozornění na překročení teploty: blikáním a pípáním
- Vzdálenost měření od senzoru teploty: $5\sim 10\text{cm}$
- Číselný LED displej
- Napájecí konektor: USB typ C
- Napájení: DC 5V
- Objem nádržky na kapalinu: 1 litr
- Nádržka určená pro mýdlo nebo dezinfekci
- Montáž: na zeď nebo na stojánek
- Provozní teplota okolí: $10\sim 40^{\circ}\text{C}$ (doporučená $15\sim 35^{\circ}\text{C}$)
- Odezva měření: 500ms
- Stav pohotovosti: 5 vteřin při neaktivitě
- Rozměry (mm): 119 x 133 x 280

Provoz

- 1) V pohotovostním režimu displej zobrazuje pohybující se tečku.



- 2) Normální teplotu displej zobrazí zeleně podsvícené číslovky.
- 3) Zvýšenou teplotu displej zobrazí červeně, začne blikat a pípat.



- 4) Teplota mimo měřicí rozsah bude signalizována s upozorněním na příliš nízkou „Lo“ nebo vysokou „Hi“:



Pokyny

- 1) Měření teploty a dezinfekce: přiložte ruku pod teploměr s dávkovačem a setrvejte s ní, dokud neuslyšíte pípnutí, následně LED displej zobrazí změřenou teplotu a tryska s dezinfekcí pustí dávku na vaši ruku.



- 2) Jednotky teploty $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ lze přepnout tlačítkem na boku přístroje.

Upevnění

Upevňovací šroub pro stojan se nachází na spodní straně. Závěsné otvory pro instalaci na zeď naleznete na zadní ploše teploměru.

