


Pre zapnutie a vypnutie teplomera použite tlačidlo na boku prístroja:

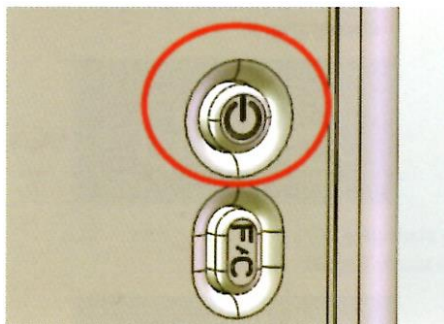

Upozornenie

- 1) Nedotýkajte sa priamo senzorov pre meranie teploty a detekcie prítomnosti ruky, zabránite tak ich znečisteniu a nepresné funkciu zariadenia.
- 2) Zariadenie prevádzkujte výhradne vo stojacej zvislej polohe!

XtendLan


CE FC RoHS 

Teplomer s inteligentným dávkovačom dezinfekcie



XL-WMT-K9

Popis častí

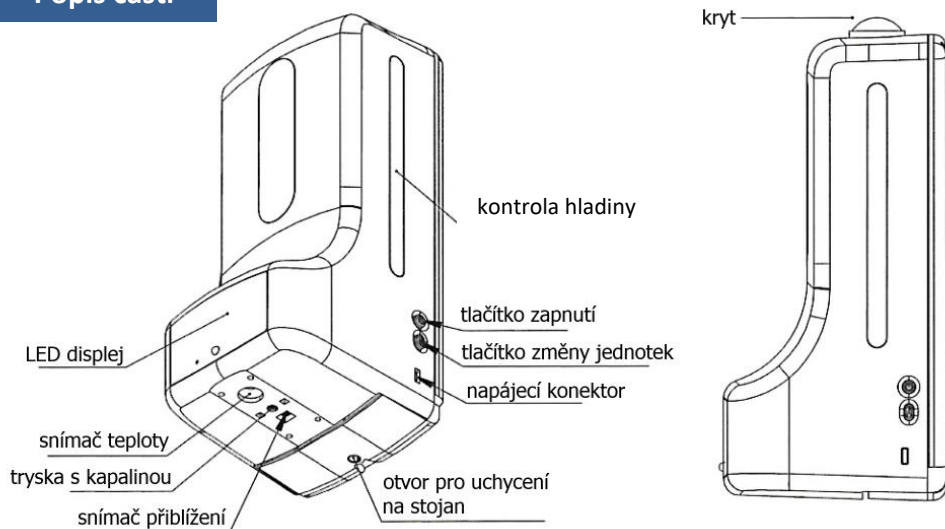

Vlastnosti

- Presnosť merania teploty $\pm 0,2$ ° C (v rozsahu 34 ~ 45 ° C)
- Upozornenie na prekročenie teploty: blikaním a pípaním
- Vzdialenosť merania od senzora teploty: 5 ~ 10cm
- Číselný LED displej
- Napájací konektor: USB typ C
- Napájanie: DC 5V
- Objem nádrčky na kvapalinu: 1 liter
- Nádržka určená pre mydlo alebo dezinfekciu
- Montáž: na stenu alebo na stojan
- Prevádzková teplota okolia: 10 ~ 40 ° C (odporúčaná 15 ~ 35 ° C)
- Odozva merania: 500ms
- Stav pohotovosti: 5 sekúnd pri neaktivite
- Rozmery (mm): 119 x 133 x 280

Prevádzka

1) V pohotovostnom režime displej zobrazuje pohybujúce sa bodku.



2) Normálna teplotu displej zobrazí zelene podsvietené číslovky.

3) Zvýšenú teplotu displej zobrazí červeno, začne blikať a pípať.



4) Teplota mimo meracieho rozsahu bude signalizovaná s upozornením na príliš nízku "Lo" alebo vysokou "Hi":



Pokyny

1) Meranie teploty a dezinfekcia: priložte ruku pod teplomer s dávkovačom a zotrvaťe s ňou, kým nebudete počuť pípanie, následne LED displej zobrazí zmeranú teplotu a tryska s dezinfekciou pustí dávku na vašu ruku.



2) Jednotky teploty ° C / ° F možné prepnúť tlačidlom na boku prístroja.

Upevnenie

Upevňovacia skrutka pre stojan sa nachádza na spodnej strane. Závesné otvory pre inštaláciu na stenu nájdete na zadnej ploche teplomeru.

